



ИНСТРУКЦИЯ

по самостоятельному забору образцов биологического материала (буккального эпителия) для последующего проведения экспертизы родства

Данная инструкция содержит пошаговые рекомендации для быстрого и легкого забора образцов с внутренней стороны щеки с использованием ватных палочек. Процедура сбора образцов занимает всего несколько минут, абсолютно безопасна и безболезненна.

В случае использования нестандартных образцов (таких как волосы, ногти, жевательная резинка и т. п.), пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом нашей организации об условиях и способе транспортировки таких образцов.

I. Подготовка к забору образцов

Воздержитесь от приема пищи и курения в течение полутора часов до начала сбора образцов. Непосредственно перед взятием образцов вымойте руки и прополощите рот теплой водой. При взятии образца у младенца подождите как минимум полчаса с момента последнего кормления. Непосредственно перед взятием образца дайте ему попить теплой воды из бутылочки для кормления.

II. Забор и отправка образцов

(необходимо собрать по ДВА ОБРАЗЦА на каждого участника анализа!)



Напишите на конверте сведения об образцах, номер образца и степень родства (например: № 1 отец).

1. Аккуратно возьмите ватную палочку, отрежьте один конец палочки.

ВНИМАНИЕ! Постарайтесь избежать контакта наконечника ватной палочки с поверхностью рук и окружающими предметами.

2. Приоткройте рот и аккуратно, с обязательным нажимом, потрите ватной палочкой внутреннюю сторону каждой щеки, как показано на рисунке. Обратите внимание: необходимо собрать не слюну, а буккальный эпителий! Палочку рекомендуется слегка поворачивать и совершить ею не менее 10 - 15 движений. Будьте аккуратны при взятии образца у младенца, не прикладывайте излишних усилий, чтобы не травмировать слизистую оболочку рта ребенка!

3. Вложите палочку с взятым образцом в подготовленный конверт, как показано на рисунке, но **НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ** его.

Возьмите **ВТОРУЮ** ватную палочку из упаковки и повторите все действия, описанные в п. 2.





4. Вложите ВТОРУЮ ватную палочку в тот же самый конверт и ЗАКЛЕЙТЕ его. На этом этапе в конверте должны находиться ДВА образца, полученные от ОДНОГО человека.
Возьмите второй конверт для образцов ДНК и повторите все вышеописанные действия (п. п. 1 – 3)
5. Для второго человека, участвующего в тесте. Не забудьте также указать на конверте, номер образца и степень родства (например: № 2, ребенок).

В случае, если забор биологического материала происходит в зале суда:

- необходимо подготовить бумажные конверты для каждого из родителей и ребенка.
- избегайте контакта наконечника ватной палочки с поверхностью рук и окружающими предметами.

При отправке:

- каждый конверт должен быть плотно заклеен, опечатан и подписан участниками.
- конверты с образцами каждого участника помещаются в один большой бумажный конверт, который также заклеивается, опечатывается и подписывается участниками и судом.

Внимание! Не допускайте отправку образцов в полиэтиленовых пакетах и конвертах!

Большой конверт вместе с протоколом изъятия биологического материала, копиями паспортов родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, определение о назначении экспертизы необходимо направить в адрес АНО «Байкальский Центр Судебных Экспертиз» в наш офис по адресу: 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 12, офис 309, тел. (3952) 75-35-11, 8 902 511 3 511.

Правление АНО «Байкальский центр Судебных экспертиз»

